

IDPBW

Identificatienummer  
VIII-01-WIK- evacuatiestoel

Versienummer  
1


Datum in voege  
01/04/2015

Pagina  
1 van 8

Werk Instructiekaart – Evacuatie hospitalisatie en poli – Evacuatie-stoel

## Gebruik Evac -Chair


### Algemene informatie

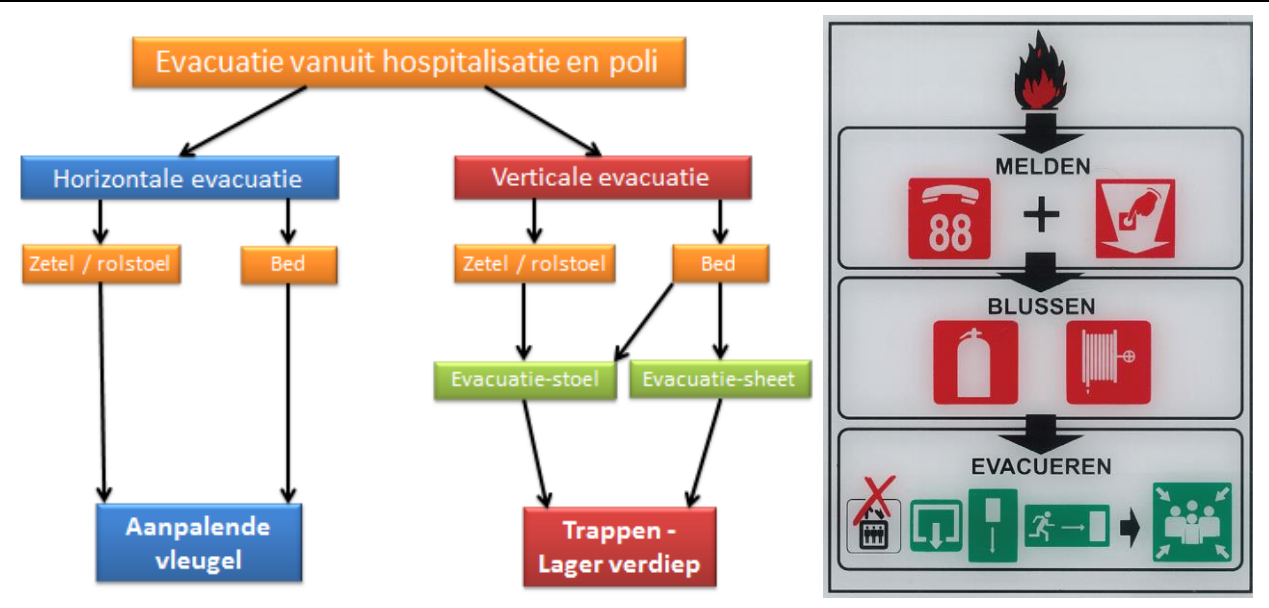

Evacuatie patiënten met behulp van de Evac-Chair

Materiaal voor evacuatie: De evacuatiestoel hangt aan de muur in de buurt van het trappenhuis en is voorzien van een beschermhoes.

**Evac-Chair**

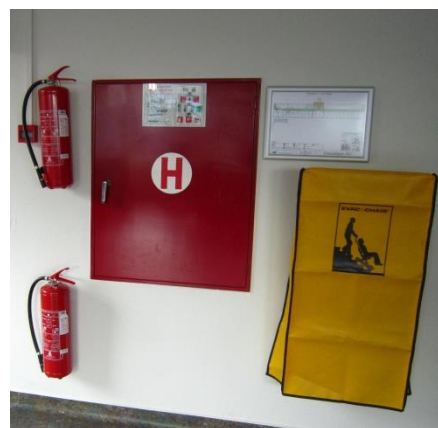

IDPBW

Identificatienummer  
VIII-01-WIK- evacuatiestoel

Versienummer  
1

Datum in voege  
01/04/2015

Pagina  
2 van 8

Werk Instructiekaart – Evacuatie hospitalisatie en poli – Evacuatie-stoel

## Voorbereiding – gebruiksklaar maken van Evac-Chair


### Stap 1

Haal de evacuatiestoel van de ophanghaak (niet aan bovenkant). Plaats de opgevouwen stoel met de rugleuning naar u toe, op de grond. Plaats een voet op de steunbaar (blauwe baar).



### Stap 2

Schuif de duwbaar naar boven tot hij vastklikt.

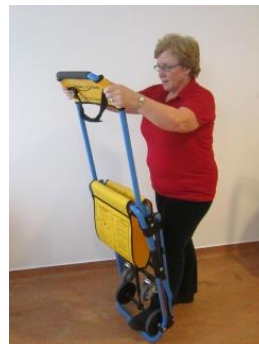


### Stap 3

Schuif hoofdsteun naar omlaag, indien de evacué geen hoofdondersteuning nodig heeft.



### Stap 4

Ontkoppel de fixatieriem.

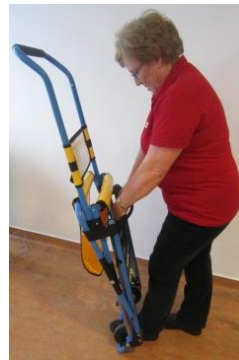

### Stap 5

Plooi de zitting van de evacuatiestoel open.



### Stap 6

Indien nodig (zie verder) ontplooi je, door middel van je voet te gebruiken, de achterste steunwieljes.



IDPBW

Identificatienummer  
VIII-01-WIK- evacuatiestoel

Versienummer  
1

Datum in voege  
01/04/2015

Pagina  
3 van 8

Werk Instructiekaart – Evacuatie hospitalisatie en poli – Evacuatie-stoel

### Werkinstructie 1 – Transfer van staan naar Evac-Chair

#### Stap 1

Begeleid de evacu e naar stand.



#### Stap 2

Fixeer de evacuatiestoel met je voet en neem met beide handen de steunbaar vast aan de zijkant, bovenaan.



#### Stap 3

Begeleid de evacu e naar zit.



#### Stap 4

Klap de wieltjes uit. Fixeer de evacu e (armen onder de riem).



### Werkinstructie 2 – Transfer van bed naar Evac-Chair

#### Stap 1

Breng de evacu e naar de rand van het bed en plaats de evacuatiestoel naast het bed, ter hoogte van de stuit.



#### Stap 2

Breng de evacu e in zit.



IDPBW

Identificatienummer  
VIII-01-WIK- evacuatiestoel

Versienummer  
1

Datum in voege  
01/04/2015

Pagina  
4 van 8

Werk Instructiekaart – Evacuatie hospitalisatie en poli – Evacuatie-stoel

**Stap 3**

Begeleid de stuit van de evacu e naar de evacuatiestoel. Laat de evacu e zoveel mogelijk meehelpen.



**Stap 4**

Fixeer de evacu e (armen onder de riem).



**Werkinstructie 3 – Transfer van zit naar Evac-Chair**

**Stap1: evacu e kan niet steunen!**

Schuif de evacu e onderuit. Verwijder daarna (indien mogelijk) de voetensteunen.



**Stap 2**

De evacu e plaatst beide armen op de schouders van de twee hulpverleners. Met een behulp van een voorhoofdsteun tillen ze de evacu e op.




**Stap 3**

Van zodra de evacu e uit de stoel is komt men zo dicht mogelijk bij elkaar te staan.



**Stap 4**

Met een zijwaartse strek-buig plaatst men de evacu e in de evacuatiestoel. Indien geen derde persoon aanwezig plaatst men best de evacuatiestoel tegen een muur

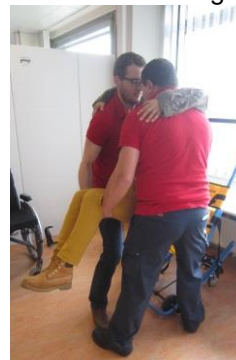



IDPBW

Identificatienummer  
VIII-01-WIK- evacuatiestoel

Versienummer  
1

Datum in voege  
01/04/2015

Pagina  
5 van 8

Werk Instructiekaart – Evacuatie hospitalisatie en poli – Evacuatie-stoel

### Stap 5

Fixeer de evacu  (armen onder de riem).



## Werkinstructie – Horizontaal evacueren met Evac-Chair

### Stap1

Bij horizontale verplaatsingen begeef je je naar een veilige zone.



IDPBW

Identificatienummer  
VIII-01-WIK- evacuatiestoel

Versienummer  
1

Datum in voege  
01/04/2015

Pagina  
6 van 8

Werk Instructiekaart – Evacuatie hospitalisatie en poli – Evacuatie-stoel

## Werkinstructie – Verticaal evacueren met Evac-Chair

### Stap 1

Plaats je in de traphal met het zicht van de evacu e weg van de trap. Hands plaats je aan de zijkant van de duwbaar.



### Stap 2

Kantel de evacuatiestoel naar voor (gewicht staat op de steunbaar) en klik door middel van een voetdruk de steunwieltes in.



### Stap 3

Kantel de evacuatiestoel zodanig dat het gewicht – zwaartepunt op de wieltes komt. Rij recht naar de trap en positioneer je aan de binnenkant.



### Stap 4

Rij af de trap zodanig dat de glijders op twee treden steunen.



### Stap 5

Plaats de hands aan de bovenkant van de duwbaar en duw in de richting van de trap. De tweede hulpverlener stapt voor de evacuatiestoel naar beneden (om diepte zicht te breken en tevens mogelijkheid om de stoel af te remmen)



### Stap 6

Aan de overloop stop je en neem dan terug de zijkant van boven vast. Neem een korte bocht en daal op dezelfde manier de volgende trap af.



### Stap 7

Op de begane grond klik je opnieuw de steunwieltes uit en begeef je naar het verzamelpunt.

IDPBW

Identificatienummer  
VIII-01-WIK- evacuatiestoel

Versienummer  
1

Datum in voege  
01/04/2015

Pagina  
7 van 8

Werk Instructiekaart – Evacuatie hospitalisatie en poli – Evacuatie-stoel

## Werkinstructie – Opvouwen van Evac-Chair

### Stap 1

Kantel de evacuatiestoel naar voor.



### Stap 2

Klik door middel van een voetdruk de steunwielletjes in.



### Stap 3

Schuif de hoofdsteun naar boven.



### Stap 4

Klik beide zekeringsspinnen in en schuif de duwbaar naar beneden.



### Stap 5

Neem de riemen aan de binnenkant van de zitting en plooi de stoel op door aan de riemen te trekken. Klik achteraan de riemen vast..



### Stap 6

Draag de stoel met de bocht van de duwbaar voor en naar boven gericht. Zo kan je niet haperen en kan de duwbaar niet uitschuiven. Neem hiervoor de evacuatiestoel vast aan de zijkant ter hoogte van de verbindingstaaf in het midden van de stoel.



IDPBW

Identificatienummer VIII-01-WIK- evacuatiestoel	Versienummer 1	Datum in voege 01/04/2015	Pagina 8 van 8
--	-------------------	------------------------------	-------------------

Werk Instructiekaart – Evacuatie hospitalisatie en poli – Evacuatie-stoel

**Opmerking!**

De evacuatiestoel is vooral geschikt voor mobiliteitscategorieën **B** en **C**, en **D**. Voor categorie **E** gebruikt men best een evacuatiesheet of matras.

**Nazorg:**

Breng de evacu e naar een veilige zone. Eventueel, indien veilig, kan een volgende evacu e worden opgehaald.

Opmvolging

Herhaling opleiding Controle evacuatiehulpmiddel Nazicht WIK evacuatiestoel	Jaarlijks Raamcontract - .. / .. / .....
---	--

	Naam	Functie	Datum	Handtekening
auteur	Buckens Filip	Ergonoom	5/03/2015	
nazicht	Arno Geert Schatterman Geert Leen Viaene	Rampenco�rdinator Rampenco�rdinator Wnd. Co�rdinator IDPBW		
machtiging	NVT	Stuurgroep bestrijding rampen		